


Οδηγίες χρήσης για λήψη δείγματος από κανάλια ενδοσκοπίων & αυλοειδών εργαλείων

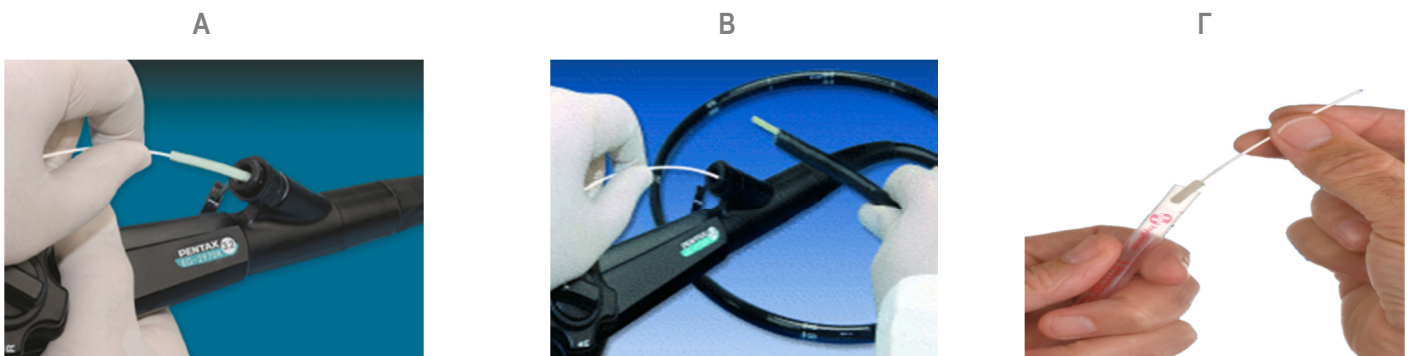

Ανοίξτε το ATP Reader και επιλέξτε το αντίστοιχο μέγεθος του Test Instrusponge που θα χρησιμοποιήσετε. Φορέστε αποστειρωμένα γάντια.

- A.** Ξεδιπλώστε το Test Instrusponge και εισάγετε το σφουγγαράκι στο ενδοσκόπιο, ωθώντας το ώσπου να βγει εντελώς από την άκρη του καναλιού του ενδοσκοπίου.
- B.** Αφαιρέστε το swab από τον πλαστικό του σωλήνα (ποτέ μην το πιάνετε από το σφουγγαράκι γιατί θα επηρεάσει την τιμή RLU). Με προσεκτικές κινήσεις ώστε το swab και το Test Instrusponge να μην έρθουν σε επαφή με οτιδήποτε, αφαιρέστε την άκρη του Test Instrusponge με την χρήση ενός ψαλιδιού (κόψτε το πλαστικό νήμα περί τα δύο εκ. από το σφουγγαράκι) και τοποθετήστε το μέσα στο σωλήνα του swab.
- Γ.** Τοποθετήστε το swab πίσω στο πλαστικό σωλήνα του και σπάστε το επάνω τμήμα λυγίζοντας το δεξιά και αριστερά. Πιέστε το επάνω τμήμα (σαν να το σπάτε) ώστε να απελευθερωθεί το υγρό αντιδραστήριο μέσα στο σωλήνα και ανακινήστε το swab για 10-15 δευτερόλεπτα ώστε να εμποτιστεί η μπατονέτα.

Τοποθετήστε το swab στο μηχάνημα Reader. Πατήστε OK και περιμένετε 15 sec μέχρι να εμφανιστεί η τιμή RLU.

ΠΡΟΣΟΧΗ : Το μηχάνημα πρέπει να βρίσκεται σε κάθετη θέση ώστε το αποτέλεσμα να είναι έγκυρο.

Λεπτομερείς εικόνες για λήψη δείγματος από τις εισόδους των καναλιών ενδοσκοπίων



(1)



(2)



(3)



(4)



(5)



(6)

Το Test Instrusponge διατίθεται σε διαφορετικά μεγέθη και διαμέτρους που καλύπτουν όλα τα αυλοειδή εργαλεία, τα εύκαμπτα και τα άκαμπτα ενδοσκόπια.

