



THE SOLIDIFIER

ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΚΟΝΗ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ

Το **THE SOLIDIFIER** είναι ένα πρωτοποριακό προϊόν σε σκόνη που έχει σχεδιαστεί για να είναι δραστικό σε συνδυασμούς υγρών που περιέχουν αίμα. Κατάλληλο για χρήση στις συσκευές αναρροφήσεως.

Ο **O.S.H.A.** συστήνει να παίρνονται όλες οι δυνατές προφυλάξεις προκειμένου να προστατευτούν οι εργαζόμενοι από απ' ευθείας έκθεση σε μολυσματικά υγρά και ειδικά, αυτών που ασχολούνται με την απομάκρυνση αυτών των υγρών. Συστήνεται η χρήση προστατευτικών μέσων για τα χέρια και τα μάτια στα άτομα που χειρίζονται τα μολυσματικά υγρά.

Το **THE SOLIDIFIER** μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε μολυσματικά υγρά που έχουν διασκορπιστεί επάνω σε σκληρές επιφάνειες καθώς και στη συσκευή αναρροφήσεως. Επιτυγχάνει 100% στερεοποίηση. Στερεοποιεί επιτυχώς και τη φορμόλη. Για υλικά που δρουν ως αδρανοποιητές η στερεοποίηση επιτυγχάνεται προσθέτοντας νερό. Είναι ακίνδυνο και περιορίζει την εξάπλωση και τον εξαερισμό επικίνδυνων υγρών ώστε να είναι ασφαλές το περιβάλλον εργασίας.

Δεν είναι τοξικό για το περιβάλλον. Είναι πολύ οικονομικό στη χρήση.

Διατίθεται σε συσκευασία για στερεοποίηση 1,5 LT υγρών, 3 LT υγρών και 16 LT υγρών.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ανοίξτε μια από τις εισόδους της αναρροφήσεως και προωθείστε την σκόνη μέσα στα μολυσματικά υγρά χωρίς να έρθει σε επαφή το στόμιο του **THE SOLIDIFIER** με τον υγρό ρύπο.

Αφήστε να περάσει λίγος χρόνος (περίπου 5-6 λεπτά) ώστε να ενεργοποιηθεί το **THE SOLIDIFIER** και να επιτύχει πλήρως την στερεοποίηση των μολυσματικών υγρών.



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΙΒΩΤΙΟΥ: 20 TEM X 480gr

Κατασκευάζεται στις Η.Π.Α. από την εταιρεία METREX. Εισάγεται και κυκλοφορεί με την εργοστασιακή συσκευασία. Φέρει σήμανση CE σε συμφωνία με την οδηγία Ιατροτεχνολογικών Συσκευών.