



CLEAN FOAM

Απολυμαντικός αφρός ευαίσθητων επιφανειών & συσκευών, χωρίς αλκοόλ

Το **Clean Foam** είναι αφρός σε spray χωρίς αλκοόλ για την απολύμανση και το καθαρισμό των επιφανειών και ιατροτεχνολογικών συσκευών που είναι ευαίσθητες στις αλκοόλες.

Είναι κατάλληλος για χρήση σε θερμοκοιτίδες, καρέκλες ασθενών, εξεταστικά κρεβάτια, δερμάτινες και απομίμησης δέρματος επιφάνειες. Επίσης είναι κατάλληλο για ακρυλικές επιφάνειες, οθόνες, οθόνες αφής, οδοντιατρικές λυχνίες, μαγνητικούς τομογράφους και κάθε είδους ιατρικό εξοπλισμό.


Περιέχει μαλακτικά στοιχεία ώστε να εξασφαλίζεται η ελαστικότητα, η απαλή υφή και η διάρκεια των δερμάτινων επιφανειών. Έχει ευχάριστο άρωμα μέντας. **pH 4.5 – 5.5**

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Καλύψτε τις επιφάνειες με τον αφρό, αφήστε το να δράσει για **1 ΛΕΠΤΟ** και σκουπίστε με καθαρό πανί ή πετσέτα μίας χρήσης.

Οι οθόνες θα πρέπει να είναι απενεργοποιημένες και κρύες κατά τη διάρκεια του ψεκασμού για προληπτικούς λόγους.

Για τις οθόνες αφής προτιμήστε να ψεκάσετε στο πανί και όχι απευθείας επάνω τους, ώστε σε περίπτωση μη ορατής ρωγμής να μη περάσει κάτω από την οθόνη υγρασία.

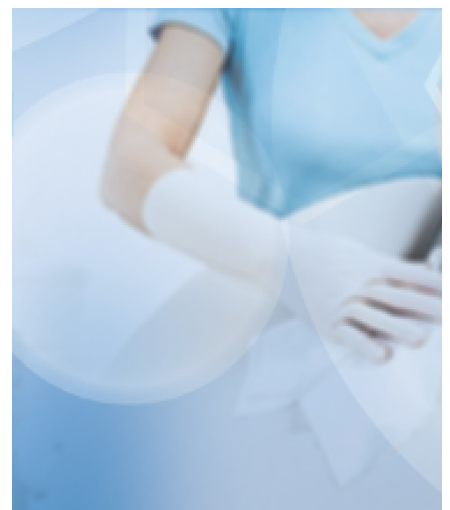

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ :	1min
Βακτηριοκτόνο,	1min
Μυκητοκτόνο,	1min
Αδρανοποιεί τους ιούς	
(συμπ. HBV/HIV/BVDV/HCV)	1min

ΕΝΕΡΓΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ :

Τεταρτοταγείς ενώσεις αμμωνίου 0,25%, μη-ιονικά επιφανειοδραστικά, γαλακτωματοποιητικοί παράγοντες, σταθεροποιητής αφρού, άρωμα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΙΒΩΤΙΟΥ:

8 X 1 LT (spray με ενσωματωμένη αντλία)

Το προϊόν έχει γνωστοποιηθεί στο Εθνικό Μητρώο Χημικών Προϊόντων σύμφωνα με το Ν 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/7.04.2014)

Κατασκευάζεται στην Εσθονία από την εταιρεία CHEMI-PHARM. Εισάγεται και κυκλοφορεί με την εργοστασιακή συσκευασία. Συμμορφώνεται με τα κριτήρια EN 13727. Η κατασκευαστική διαδικασία έχει γίνει με βάση τα πρότυπα ISO 9001, ISO 13485 και ISO 14001. Φέρει σήμανση CE σε συμφωνία με την οδηγία Ιατροτεχνολογικών Συσκευών.