



## DETRO ACTIV

### Απολυμαντική σκόνη υπεροξικού οξέως με ένζυμα

Το **Detro Activ** είναι κατάλληλο για τον καθαρισμό και την απολύμανση των χειρουργικών εργαλείων, εύκαμπτων και άκαμπτων ενδοσκοπίων. Είναι συμβατό με ανοξείδωτο ατσάλι, γυαλί, ξύλο, κεραμικό, σιλικόνη και πλαστικό. Κατάλληλο για χρήση με βυθισμό. Περιέχει ένζυμα για επιπλέον καθαριστική δράση, έχει ευρύ αντι μικροβιακό φάσμα και είναι συμβατό με τα ενδοσκόπια. Είναι βιοδιασπώμενο.

Έχει Καθαριστικές, απολυμαντικές και αποστειρωτικές ιδιότητες. Διαλύεται πλήρως στο νερό. Το ενεργό διάλυμα είναι διάφανο επιτρέποντας την οπτική παρακολούθηση των εργαλείων κατά το χειρισμό τους και παραμένει ενεργό για 24 ώρες.

Τα ένζυμα (αμυλάση, πρωτεάση, λιπάση) που περιέχονται στη σύνθεσή της αυξάνουν τις καθαριστικές ιδιότητες επιταχύνοντας την απομάκρυνση του αίματος, πρωτεΐνης, και λίπους και έχει αντιδιαβρωτικούς παράγοντες. pH 8-9.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ	Norms (EN)	ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ	ΧΡΟΝΟΣ ΔΡΑΣΗΣ
Ιοκτόνο (incl. adeno, polio, MNV)	EN 14476+A1	2%	10 min
Βακτηριοκτόνο, Μυκητοκτόνο (incl. Escherichia coli, Staphylococcus aureus, pseudomonas aeruginosa, Enterococcus hirae, Candida albicans)	EN 13727 EN 13624 EN 14561 EN 14562	0.5%	5 min
Μυκοβακτηριοκτόνο, Φυματιωκτόνο (Incl. Mycobacterium terrae, Mycobacterium avium)	EN 14563	2%	5 min
Σποροκτόνο (Bacillus Subtilis)	EN 13704	2%	10 min

### Καθαρισμός και απολύμανση εργαλείων, συσκευών, επιφανειών

Προσθέστε 5gr / λίτρο χλιαρού νερού και ανακατέψτε 2-3 min μέχρι να διαλυθεί τελείως η σκόνη. Βυθίστε τα όργανα για 10 λεπτά και ξεβγάλτε. Αλλάξτε το διάλυμα στο τέλος της ημέρας.

### Υψηλού επιπέδου απολύμανση ή χημική αποστείρωση οργάνων

Προσθέστε 20gr / λίτρο χλιαρού νερού και ανακατέψτε 2-3 min μέχρι να διαλυθεί τελείως η σκόνη. Βυθίστε τα όργανα για 10 λεπτά και ξεβγάλτε. Αλλάξτε το διάλυμα στο τέλος της ημέρας

**ΣΥΝΘΕΣΗ:** Υπεροξικό οξύ που δημιουργείται από την αντίδραση disodium carbonate και TAED με νερό, ένζυμα (αμυλάση, λιπάση, πρωτεάση), αντιδιαβρωτικούς παράγοντες.

**ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΙΒΩΤΙΟΥ:** 4 X 5 LT

**Το προϊόν έχει γνωστοποιηθεί στο Εθνικό Μητρώο Χημικών Προϊόντων (ID 29664) σύμφωνα με το Ν 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α'/7.04.2014)**

Το προϊόν φέρει σήμανση CE σε συμφωνία με την οδηγία Ιατροτεχνολογικών Συσκευών. Κατασκευάζεται στην Τουρκία από την εταιρεία DETRO HEALTHCARE. Εισάγεται και κυκλοφορεί με την εργοστασιακή συσκευασία.