



DETRO OPA

Απολυμαντικό υγρό χειρουργικών εργαλείων και ενδοσκοπίων έτοιμο προς χρήση με ορθοφθαλδεύδη.

Το **Detro OPA** είναι έτοιμο προς χρήση απολυμαντικό με ορθοφθαλδεύδη. Δεν αφρίζει, δεν είναι διαβρωτικό, δεν είναι τοξικό, είναι άοσμο και δεν σχηματίζει επικίνδυνα αέρια. Είναι ασφαλές για τον χρήστη και παραμένει ενεργό για **14 ημέρες**.

Κατάλληλο για την απολύμανση ενδοσκοπίων, χειρουργικών εργαλείων, γυάλινων, πλαστικών και εργαλείων μικροχειρουργικής. **Επιτυγχάνει υψηλή απολύμανση και σποροκτονία σε 5 λεπτά. pH 7- 8.5**

Χρήση: Βυθίστε τα όργανα μέσα στο διάλυμα **Detro OPA** (να καλύπτονται πλήρως από το υγρό) αφού πρώτα έχουν περάσει από το στάδιο του καθαρισμού και αφήστε τα για **5 λεπτά**. Στη συνέχεια βγάλτε τα από το διάλυμα και ξεπλύνετε τα καλά με νερό.

Για την ασφαλή απόρριψη του διαλύματος χρησιμοποιήστε 30gr γλυκίνης ανά 5 lt διαλύματος ώστε να αδραντοποιηθεί η ορθοφθαλδεύδη και μετά συνεχίστε με την απόρριψή του.

Δεν είναι συμβατό με απολυμαντικά βασισμένα σε αμίνες. Πριν το χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά θα πρέπει όλα τα εργαλεία, κιάτα και ο εξοπλισμός να πλυθούν καλά από το προηγούμενο απολυμαντικό ώστε να μην υπάρχουν προηγούμενα κατάλοιπα.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ	Norms (EN)	ΧΡΟΝΟΣ ΔΡΑΣΗΣ
Βακτηριοκτόνο, Μυκητοκτόνο (incl. <i>pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 13442, <i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538, <i>Enterococcus hirae</i> ATCC 10541, <i>Candida albicans</i> ATCC 10231, <i>Aspergillus niger</i> ATCC 16404)	EN 13727 EN14561 EN 13624 EN14562	5 min
Μυκοβακτηριοκτόνο, Φυματιοκτόνο (Incl. <i>Mycobacterium terrae</i> ATCC 15755, <i>Mycobacterium avium</i> ATCC 15769)	EN 14348 EN 14563	5 min
Ιοκτόνο (incl. BVDV ATCC-VR-534, <i>Vaccinia</i> CAMP-V-160, HIV, HBV, HCV, adeno, polio)	EN 14476 +A1	5 min
Σποροκτόνο (incl. <i>Bacillus subtilis</i> ATCC 6630)	EN 13704	5 min

ΕΝΕΡΓΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: 0.55% Ορθοφθαλδεύδη

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΙΒΩΤΙΟΥ: 4 X 5 LT