



STERISEPT Ready To Use

Απολυμαντικό-καθαριστικό σπρέι για ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό χωρίς αλκοόλη.

- ❖ Χωρίς αλκοόλη, αλδεΐδες, φαινόλες και PHMB
- ❖ Κατάλληλο για επιφάνειες ευαίσθητες στις αλκοόλες
- ❖ Συνδυάζει καθαριστική και απολυμαντική δράση

Το **Sterisept RFU** είναι έτοιμο προς χρήση σπρέι-αφρός υψηλού επιπέδου απολύμανσης για τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και τις επιφάνειες που είναι ευαίσθητες στις αλκοόλες. Δεν περιέχει αλκοόλη, αλδεΐδες ή PHMB και μπορεί να χρησιμοποιηθεί στον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό που είναι ανθεκτικός στο νερό. Χάρη στην ειδική του σύνθεση έχει καλή συμβατότητα με τα υλικά μαζί με καθαριστικές ιδιότητες. Έχει ευρύ φάσμα βακτηριοκτόνου (συμπ. MRSA, VRE), μύκοβακτηριοκτόνου (συμπ. M.Avium, M.terrae) και μυκητοκτόνου δράσης. Το προϊόν είναι επίσης ενεργό έναντι σε ιούς (συμπ. HBV, HIV, HCV, Vaccinia, Rota) και σπόρους (C.Difficile).

Το **Sterisept RFU** είναι επίσης κατάλληλο για προ-απολύμανση και ύγρανση των χειρουργικών εργαλείων. Είναι ιδανικό προϊόν για την ταχεία απολύμανση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και κατάλληλο για επιφάνειες που είναι κοντά σε ασθενείς όπως στρώματα φυσιοθεραπείας, πίνακες χειρισμού, καρέκλες ασθενών, αναπηρικά καροτσάκια, φορεία, δίσκους, καροτσάκια, θερμοκοιτίδες, οθόνες, πληκτρολόγια, ασθενοφόρα, επεμβατικό και μη επεμβατικό ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό.

Μπορεί να εφαρμοστεί στις επιφάνειες είτε με ένα πανί είτε με απευθείας ψεκασμό.

Χρήση με πανί: Βάλτε επαρκή ποσότητα από το υλικό πάνω σε ένα κατάλληλο πανί και σκουπίστε τις επιφάνειες.

Χρήση με ψεκασμό: Ψεκάστε πάνω στην επιφάνεια από απόσταση περίπου 30cm και απλώστε με ένα πανί.

Εξασφαλίστε απόλυτη κάλυψη των επιφανειών. Ο χρόνος δράσης του είναι από **60sec** ανάλογα τη δράση (Βλ. πίνακα αποτελεσματικότητας). Το προϊόν παραμένει ενεργό μέσα στη συσκευασία, όταν ανοιχτεί, μέχρι την ημερομηνία λήξεως που αναγράφεται στο μπουκάλι.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ	Norms (EN)	ΧΡΟΝΟΣ ΔΡΑΣΗΣ
Βακτηριοκτόνο (συμπ. MRSA, VRE)	EN13727, EN14561, EN13697	1 min
Μυκητοκτόνο	EN13624, EN14562, EN13697	1 min
Μυκοβακτηριοκτόνο (συμπ. M.Avium, M. Terrae)	EN14348	5 min
Ιοκτόνο (συμπ. όλοι οι ιοί με περίβλημα)	EN14476	1 min
Rotavirus	EN14476	5 min
Clostridium difficile	EN13704	15 min

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ | 100 g of product contains active ingredients: didecyl-dimethyl-ammonium chloride (ddac) 0,45g ; N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine 0,45g

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | Δοχείο 1 λίτρου με αντλία.

Κατασκευάζεται στην Εσθονία από την εταιρεία CHEMI-PHARM. Εισάγεται και κυκλοφορεί με την εργοστασιακή συσκευασία Η κατασκευαστική διαδικασία έχει γίνει με βάση τα πρότυπα ISO 9001, ISO 13485 και ISO 14001. Φέρει σήμανση CE σε συμφωνία με την οδηγία Ιατροτεχνολογικών Συσκευών.