



STERISEPT WIPES

Απολυμαντικά και καθαριστικά μαντηλάκια χωρίς αλκοόλ ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού

- ❖ Χωρίς αλκοόλη, αλδεΐδες, φαινόλες και PHMB
- ❖ Κατάλληλο για επιφάνειες ευαίσθητες στις αλκοόλες
- ❖ Συνδυάζουν καθαριστική και απολυμαντική δράση

Τα **Sterisept Wipes** είναι μαντηλάκια ταχείας απολύμανσης χωρίς αλκοόλη για τον μη επεμβατικό ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και για επιφάνειες ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού που είναι ευαίσθητες στην αλκοόλη. Είναι μίας χρήσης σε πρακτική συσκευασία. Δεν περιέχουν αλκοόλη, αλδεΐδες, ή PHMB και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε όλες τις επιφάνειες που είναι ανθεκτικές στο νερό. Έχουν ειδικά σχεδιασμένη σύνθεση ώστε να έχουν καλή συμβατότητα με τα διάφορα υλικά και καλές καθαριστικές ιδιότητες.

Τα **Sterisept Wipes** έχουν ευρύ φάσμα βακτηριοκτόνου (συμπ. MRSA, VRE), μυκοβακτηριοκτόνου (συμπ. M.Avium, M.terrae) και μυκητοκτόνου δράσης. Τα μαντηλάκια είναι ενεργά έναντι σε ιούς (συμπ. HBV, HIV, HCV, Vaccinia, Rota) και σπόρους (C.Difficile).

Τα **Sterisept Wipes** έχουν καλή συμβατότητα με ανοξειδωτο ασάλι, αλουμίνιο, χαλκό, μπρούτζο, κεραμικό, PVC, ελαστικό, πλαστικό, σιλικόνη, ακρυλικό και πλεξιγκλάς.

Χρήση : Είναι έτοιμα προς χρήση, ανοίξτε το καπάκι της συσκευασίας και τραβήξτε το μαντηλάκι, κλείστε ξανά τη συσκευασία καλά. Σκουπίστε καλά εξασφαλίζοντας ότι η επιφάνεια έχει καλυφθεί πλήρως από το υγρό. Ο χρόνος δράσης ξεκινάει από 1min ανάλογα τη δραστηριότητα (βλ. πίνακα δραστηριότητας). Τα **Sterisept Wipes** είναι ιδανικά για την ταχεία απολύμανση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και επιφανειών που είναι κοντά σε ασθενείς όπως στρώματα φυσιοθεραπείας, πίνακες χειρισμού, καρέκλες ασθενών, αναπηρικά καροτσάκια, φορεία, δίσκους και καροτσάκια.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ	Norms (EN)	ΧΡΟΝΟΣ ΔΡΑΣΗΣ
ΒΑΚΤΗΡΙΟΚΤΟΝΟ (συμπ. MRSA, VRE, Acinetobacter baumannii, Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli)	EN13727, EN14561, EN13697, EN16615	1 min
ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ (συμπ. Candida)	EN13624, EN14562, EN13697, EN16615	1 min
ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΟΚΤΟΝΟ (συμπ. M.Avium, M. Terrae)	EN14348	5 min
Όλοι οι ιοί με περιβλήμα (συμπ. MVA, MNV, HBV, HIV, HCV)	EN14476	1 min
Rotavirus	EN14476	5 min
Clostridium difficile	EN13704	15 min

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ : 100 g of product contains active ingredients: didecyl-dimethyl-ammonium chloride (ddac) 0,45g; N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine 0,45g

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : ΔΟΧΕΙΟ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ | ΔΟΧΕΙΟ 200 ΤΕΜΑΧΙΩΝ