

## DETRO PAA 1500



### Απολυμαντικό υγρό με υπεροξικό οξύ έτοιμο προς χρήση

Το **Detro PAA 1500** είναι κατάλληλο για υψηλού βαθμού απολύμανση χειρουργικών εργαλείων, αναισθησιολογικών και οδοντιατρικών εργαλείων από ανοξείδωτο ατσάλι, εύκαμπτων και άκαμπτων ενδοσκοπίων, ιατρικών εργαλείων από πλαστικό, σιλικόνη, γυαλί, ακρυλικό, λάστιχο.

Είναι έτοιμο προς χρήση και διαθέτει ενεργοποιητή. Όταν ενεργοποιείται το διάλυμα παράγει 1500ppm υπεροξικό οξύ. Το διάλυμα παραμένει ενεργό μέχρι 14 ημέρες και ο έλεγχος δραστηριότητας του διαλύματος γίνεται με ειδικούς δείκτες. Δεν περιέχει αλδεϋδες ή φαινόλες. pH 5-8. Είναι χαμηλού αφρισμού.

**Οδηγίες Χρήσης:** Αδειάζετε το μπουκαλάκι του ενεργοποιητή στο δοχείο με το **Detro PAA 1500** και στη συνέχεια κλείνετε το δοχείο και το κουνάτε. Το διάλυμα είναι έτοιμο για χρήση μετά από 10 λεπτά.

Αφού έχετε καθαρίσει και ξεπλύνει τα εργαλεία ή ενδοσκόπια, τα βυθίζετε πλήρως στο διάλυμα **Detro PAA 1500** για **5 λεπτά**. Μετά τον χρόνο δράσης βγάζετε τα εργαλεία ή ενδοσκόπια από το διάλυμα και ξεπλένετε.

**Προειδοποιήσεις:** Κατά την πρώτη χρήση για την αποφυγή χημικής αντίδρασης σε όργανα και ενδοσκόπια, πριν από την εφαρμογή καθαρίστε σωστά δοχείο απολύμανσης, όργανα και ενδοσκόπια με ενζυματικό καθαριστικό διάλυμα. Το απολυμαντικό πρέπει να εφαρμόζεται σε καθαρά και στεγνά όργανα, ενδοσκόπια κ.λπ. Διατηρήστε το διάλυμα σε κλειστό δοχείο και αποφύγετε την επαφή με τον αέρα ώστε να μην προκαλέσει μείωση της δραστηριότητάς του. Μην κρατάτε τα όργανα στο διάλυμα περισσότερο από το χρόνο δράσης (5 λεπτά). Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε γαλβανισμένο και βαμμένο ανοδιωμένο αλουμίνιο, νικέλιο, χρώμιο και επιμεταλλωμένα υλικά.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ	Norms (EN)	ΧΡΟΝΟΣ ΔΡΑΣΗΣ
Ιοκτόνο (incl. adeno, MNV)	EN 14476+A2	5 min
Βακτηριοκτόνο, Μυκητοκτόνο (incl. Escherichia coli, Staphylococcus aureus, pseudomonas aeruginosa, Enterococcus hirae, Candida albicans, Asregillus brasiliensis)	EN 13727 EN 13624 EN 14561 EN 14562	5 min
Μυκοβακτηριοκτόνο, Φυματιοκτόνο (Incl. Mycobacterium terrae)	EN 14348 EN 14563	5 min
Σποροκτόνο (Bacillus Subtilis, Bacillus cereus, Clostridium sporogenes)	EN 13704	5 min

**ΣΥΝΘΕΣΗ:** Detro PAA 1500 Έτοιμο προς χρήση διάλυμα: 1500 ppm υπεροξικό οξύ. | Detro PAA 1500 (Βάση): Υπεροξειδίο του υδρογόνου, σταθεροποιητής, βοηθητικές ουσίες. | Detro PAA 1500 (ενεργοποιητής): N-acetyl caprolactam, βοηθητικές ουσίες.

**ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΙΒΩΤΙΟΥ:** 4 X 5 LT

**Το προϊόν έχει γνωστοποιηθεί στο Εθνικό Μητρώο Χημικών Προϊόντων (ID 29664) σύμφωνα με το Ν 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α'/7.04.2014)**

Το προϊόν φέρει σήμανση CE σε συμφωνία με την οδηγία Ιατροτεχνολογικών Συσκευών. Κατασκευάζεται στην Τουρκία από την εταιρεία DETRO HEALTHCARE. Εισάγεται και κυκλοφορεί με την εργοστασιακή συσκευασία.